

従来の発想を変えた優れた携帯トイレ

ズボンやスカートの内側(股関節部分)に装着する携帯トイレ

「普段と変わらない見た目でも外出も安心」

前立腺肥大症、尿・排尿障害、過活動膀胱等の人は、推定患者数810万人の方が、また、高齢化と共に尿意をもよおすと我慢できないと云われております。

そのような事情からトイレが無いと不安で、旅行に行けないなど、自由に外出できない状況下にあります。

そこでズボンやスカート内側に装着可能な製品“つけてよかった・もってよかった”を開発いたしました。

常時ズボンやスカート内側に装着することで、いつでもどこでも短時間で処理でき、生活の質を上げることができます。

これからの寒い時期には欠かせないアイテムと云えます。

なお、この製品は外袋と中袋から構成され、

- ①外袋は、(株)東レの優れた制菌素材、吸汗・速乾快適素材で清潔、洗濯もOK。
- ②中袋は、逆流防止二重構造、吸水ポリマーで尿を瞬間硬化し臭いもカット。
- ③特に女性に優しい後ろ漏れ防止設計が施されています。



夜中に何度もトイレに起


オシッコを我慢することができなくなっ

交換用使い捨て中袋

本体(別売り)にセットして、ズボンやスカートの内側(股関節部分)に装着し、いざという時のために準備しておくことができます。



【使い捨て中袋交換方法】

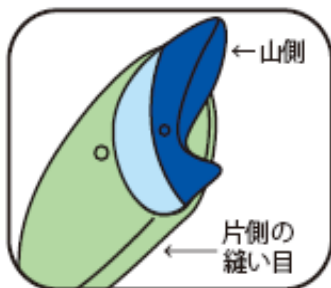

中袋の山側を本体の縫い目のない側にして中に入れます。



本体と中袋の穴位置を合わせて、ストラップとストッパーを取り付けてください。



男性は山側を前に、女性は山側を後ろにして使用。女性にやさしい後ろもれ防止設計。



硬質ゴムリングの復元作用で、使用時に間口が大きく開放。肌に触れる部分はソフトなウレタン素材。

— 開発元 — 株式会社ファイブテン

特許取得、商標登録済

もってよかった!! 本体+中袋
価格 4,180円(税込)
もってよかった550 中袋10枚入
価格 3,850円(税込)

— 取扱元 —

全省庁統一資格取得企業
JEIC販売株式会社

東京都八王子市久保山町2-36-4


TEL 042-659-3110

http://jeic-sa.jp

E-mail info@jeic-sa.jp

— 販売代理店 —


男性の場合の装着図

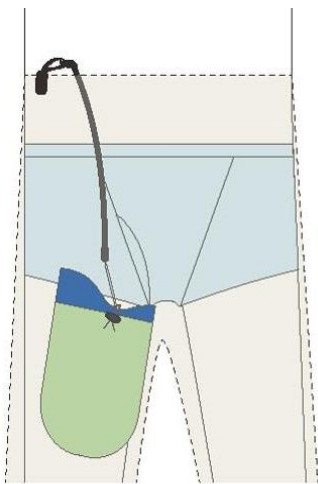

ズボンの下はこのよう
な状態で装着します



自由に外出 楽しみましょう

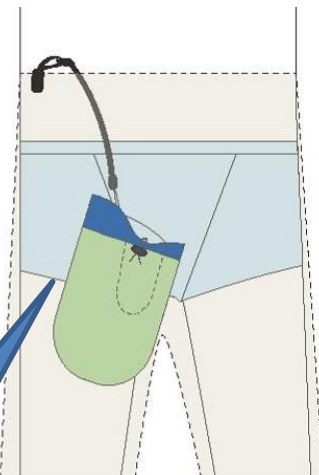

ズボンの下の状態で、
いつでもようがたせる状
態で装着します

ポリマーで
尿を瞬時に
ジェル状に
硬化

だから安心

交換用中袋はまだほかに使い方があります

こんな時に、もっててよかった！！



発熱時の
氷のうに

冷水を入れて

捻挫・筋
肉痛の湿
布に

嘔吐の受
け袋とし
て



そのまま

こんな時に、もっててよかった！

- ポリマーで尿を瞬時に**ジェル状**に硬化。
- 逆流防止二重構造さらにパワーアップで**臭いをカット**。
- 持ちやすく、しっかり固定できフィットするように研究されています。
- 中袋は肌に触れる部分は、ソフトなウレタン素材。


介 護

アウトドア

レジャー

ドライブ

◆本体(カバー)は、優れた制菌効果を発揮する制菌素材を使用しています。
洗濯は50回でも効果を保ちます。

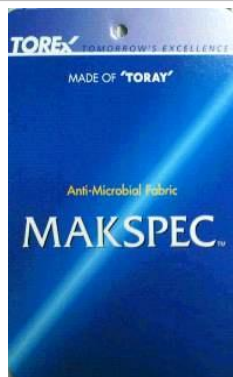

本体(カバー)は「東レ」が開発した「SEK認証」優れた制菌効果を発揮する制菌加工素材「マックスベック™」を使用。
吸汗・拡散・速乾、快適素材使用
洗濯OK(繰り返し洗濯しても効果を保ちます。)
ノンホルマリン系の素材です。



(社)繊維評価技術協議会
認証番号006B98

制菌加工

(繊維上の細菌の増殖を抑制します)
剤名:有機系(ヒロジン)

東レ株式会社

ご使用上の注意

- ※尿に異常があると固まらない場合があります。
- ※火のそばに置かないでください。

◇予備の中袋が使い終わりましたら、専用の中袋「もっててよかった550」をお求めください。

◇この商品は、価格・仕様の変更を予告なく行う場合がございます。



商品規格

- ◆本体(カバー)
ポリエステル100%・硬質ゴム
- ◆中袋
ウレタン(受け口)・ポリエチレン(袋)・吸水ポリマー
- ◆ストラップ
ポリアセタール・ABS・ステンレス・ポリエステル・ポリウレタン・エラストマー・ナイロン・ゴム
- ◆サイズ
本体:215mm×150mm
中袋:240mm×140mm 容量500cc